
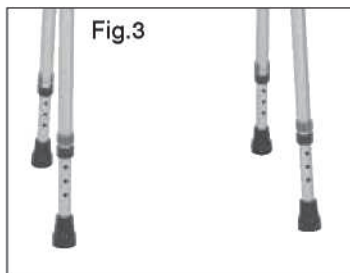


Popis	Nový kód
Pevný	09 132 5356
Ploché balení	09 156 4749
Volitelný potah sedadla	09 156 4756

Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití a uschovejte jej pro pozdější použití.

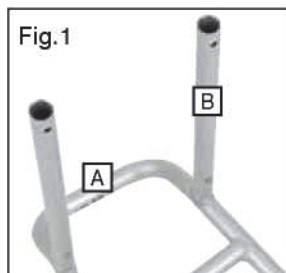

Maximum user weight

Úvod

Tato sprchová sedačka Homecraft je lehká, výškově nastavitelná nerezová sprchová sedačka vyrobená z hliníkových trubek a vybavená plastovým sedákem. Má vestavěná boční madla, která nabízejí stabilitu a dodatečnou podporu pro uživatele. Pro větší pohodlí a luxus je k dispozici volitelná deska sedadla (prodává se samostatně).

Zamýšlené použití

Kompenzaci postižení zajištěním plochy pro sezení ve sprše.

Montážní návod (pouze u verze v plochem balení)

1. Odstraňte všechny obaly.
2. Vezměte rám ve tvaru A (A) a připojte příčninky (B) tak, aby tlačné čepy zcela vyčnívaly, viz **obr.1**.
3. Opakujte na druhé straně sprchové sedačky, viz **obr.2**.
4. Zasuňte nohy do základny rámu a ujistěte se, že jsou otvory v každé sekci zarovnané.
5. Zacykněte do „západek“ v požadované výšce a zajistěte, aby všechny čtyři nohy byly umístěny ve stejné výšce, viz **obr. 3**.
6. Umístěte plastové sedadlo (C) přes příčninky a zatlačte, dokud spony sedáku nezapadnou na místo, viz **obr.4**.
7. Správně smontovanou sprchovou sedačku vidíte na **obr. 5**.

Nastavení výšky

1. Chcete-li upravit výšku, uchopte „západku“ mezi palcem a ukazováčkem a vytáhněte ji.
2. Zasuňte nohu dovnitř nebo ven do požadované polohy.
3. Zatlačte sponu pevně zpět do otvoru.
4. Opakujte stejný postup pro ostatní nohy a ujistěte se, že jsou všechny čtyři nohy nastaveny na stejnou výšku.

Péče a čištění

Hliníková sprchová sedačka Homecraft je navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. Při čištění je otírejte vlhkým, měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou vodu. Sprchové křeslo můžete umístit pod tekoucí vodu s mírným tlakem nebo je osprchovat shora dolů, aby se usnadnilo čištění. Plastový sedák lze odepnout, aby se usnadnilo čištění. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani čisticí prostředky na bázi bělidla, abyste nedošlo ke změně barvy. Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně křeslo otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte.

Informace o záruce

Sprchové sedačky Homecraft mají záruku na jeden rok od data nákupu z důvodu vady zpracování a materiálu. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce. Záruka se nevztahuje na následné náklady plynoucí z vyřizování reklamace, především ne pak na náklady za dopravu a cestování, ztrátu na výdělků a další výdaje. Výrobce nepřijímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.

UPOZORNĚNÍ

- Sprchová sedačka by v žádném případě neměla být používána ke stání.
- Při používání sedačky se ujistěte, že jsou nohy uživatele pevně na podlaze.
- Ujistěte se, že jsou všechny čtyři nohy sedačky nastaveny na stejnou výšku.
- Nikdy nepřekračujte uvedenou maximální hmotnost uživatele 190 kg
- Neskladujte při teplotě pod bodem mrazu.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k natahování ani přílišnému namáhání seřizovacích otvorů.
- Zkontrolujte, zda nejsou gumové kroužky a pojistky rozbité, opotřebované nebo uvolněné.
- Nepoužívejte s poškozeným nebo prasklým sedákem.
- Vzhledem k tomu, že sedačka nemá zádovou opěrku, při jejím používání se neopírejte.

Homecraft Lehká sprchovací sedačka s nastavitelnou výškou

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.
Tento návod prosím uschovejte pro pozdější použití.



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK.

UK:

Tel.: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

Mezinárodní:

Tel.: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

W68 N158 Evergreen Blvd.
Cedarburg, WI 53012, USA
www.performancehealth.com

Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy
NSW, Australia 2145.

Tel.: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

www.performhealth.com.au

Performance Health France

13 rue Andre Pingat, CS 10045,
51724 Reims Cedex, France
Tel: 00(33) 03 10 00 79 30
Fax: 00(33) 03 54 70 04 34
www.performancehealth.fr

